



Befüllung: Entnehmen Sie bitte die Tagesdosierer aus dem Magazin und befüllen Sie die jeweiligen Wochentage mit den benötigten Medikamenten entsprechend Tag und Einnahmezeit (Bild 1). Zur Reinigung entnehmen Sie bitte die Tagesdosierer und entfernen die Deckel (Bild 2, 3). Jetzt können Sie Deckel und Dosiererunterteile reinigen (spülmaschinenfest). Wenn Deckel und Unterteile getrocknet sind, klicken Sie die Deckel einfach (Bild 4) in der richtigen Position wieder auf (Einnahmefach morgens ist das größere Fach, Bild 1), bis sie sicher sitzen und sich für die Entnahme entsprechend verschieben lassen.

Entnahme der Medikamente aus dem Tagesdosierer: Der Einnahmetag und die Einnahmezeiten sind auf dem Deckel des Tagesdosierers markiert, das größere Fach („morgens“) befindet sich immer links (Bild 1). Für die Einnahmezeiten „morgens“ bis „nachts“ schieben Sie bitte den Deckel nach rechts (Bild 2), bis das jeweilige Fach frei liegt, entnehmen die Medizin und schieben den Deckel anschließend zurück in die Ausgangsposition, bis der Tagesdosierer verschlossen ist. Für die Entnahme aus dem Bedarfsfach schieben Sie bitte den Deckel des Tagesdosierers nach links, nach der Entnahme nach rechts zurück in die Ausgangsposition (Bild 5).

Entnahme der Tagesdosierer aus dem Magazin: Der jeweilige Tagesdosierer wird zur Entnahme einfach vorn herausgenommen (Bild 6) und zur Rückgabe auf gleichem Weg durch leichten Druck wieder zurückgestellt (Bild 7). Zum Wechsel des Wochentages werden solange andere Tagesdosierer von hinten in das Magazin eingeschoben (Bild 8), bis der benötigte Wochentag vorn erscheint.



Medikamentenbox für eine Woche.

Medizinprodukt der Klasse I 

Medikamentenbox vor Kindern sicher aufbewahren und fern halten!

Version: 26.03.2013

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch unsere nützlichen Tipps und Hinweise!

- Vor Erstgebrauch bitte die einzelnen Tagesdosierer auswaschen/ausspülen! Empfehlung - bitte die Teile mit lauwarmem Wasser und einem milden, für die Reinigung von Geschirr in privaten Haushalten zugelassenem Reinigungs- bzw. Spülmittel säubern. Man kann aber auch die Spülmaschine (Regeltemperatur 70°C) nutzen, da der Dosierer spülmaschinenfest ist.
- Empfohlen wird die Reinigung ebenfalls vor Neubestückung der Dosierer mit Medikamenten oder bei eintretenden Medikationsänderungen!
- Bitte die Medikamentenbox vor Kindern sicher aufbewahren – es darf kein Zugriff auf die Box durch Kinderhand erfolgen!
- Bitte bei der Einnahme von Medikamenten immer auf die richtige Reihenfolge der Tage achten!
- Beachten Sie bitte auch eventuelle besondere Lagerungsbedingungen von Medikamenten wie z. B. Lichtempfindlichkeit und Temperatur laut Beipackzettel der jeweiligen Verpackung. Bei Unklarheiten fragen Sie bitte Ihren Apotheker oder die Herstellerfirma des Medikaments. Für die unkorrekte Benutzung der **ANABOX®** oder die unkorrekte Einnahme von Medikamenten übernehmen wir keinerlei Haftung!
- Die Benutzung der Medikamentenbox durch Personen mit geistigen Behinderungen sollte unter fachkundiger Aufsicht erfolgen.



anmed GmbH

Gartenstraße 13
D-09456 Annaberg-Buchholz
Tel. +49 (0) 3733 596300
Fax +49 (0) 3733 596301
Mail: info@anmed.de
Web: www.anabox.de



Vertrieb durch:
WEPA Apothekenbedarf
GmbH & Co KG, 56204 Hillscheid
www.wepa-dieapothekenmarke.de

